

Istruzioni per l'uso del Sanificatore Smart Care



- **Riempire il serbatoio con il liquido sanificante (seguendo le istruzioni fornite) ed avvitare bene al corpo pistola.**
- **Collegare la pistola al tubo mediante l'attacco rapido (pressione massima 3 bar).**
- **La continua fuoriuscita dell'aria dalla testina è normale.**
 - **Premere sul grilletto per spruzzare ed iniziare la sanificazione.**
 - **Utilizzare il rubinetto regolatore per perfezionare la quantità di prodotto nebulizzato.**
- **E' consigliabile mantenere una distanza dagli oggetti di minimo 40 cm.**
- **A fine utilizzo rimuovere il detergente dal serbatoio.**
 - **Pressione di lavoro ottimale : 0,5-1 bar.**
 - **Consumo medio pistola 40-70 l/m a 0,5-3 bar.**