

ITA: ISTRUZIONI PER LA SOSTITUZIONE DELLA GUARNIZIONE DEL CONTENITORE DELLA PISTOLA
ENG: INSTRUCTIONS FOR THE REPLACEMENT OF THE AIR-GUN LIQUID CONTAINER GASKET

1. ITA: Svitare il contenitore della pistola nebulizzatrice
ENG: Unscrew the nebulization air-gun



2. ITA: Togliere la guarnizione presente ed inserire la nuova guarnizione come in foto
ENG: Remove old gasket and fit the new gasket as in the picture



3. ITA: Inserire l'O-ring sul contenitore come in foto
ENG: Position the o-ring on the container neck as in the picture



4. ITA: Avvitare con forza il contenitore alla pistola
ENG: Tighten well the container to the air-gun

